



Gebrauchsanweisung AlkoStar AL-2500

1. Gerät anschalten

Den Batteriedeckel abnehmen und den Batterieschutzstreifen abziehen. Um den AlkoStar AL-2500 einzuschalten, drücken Sie den mittleren Knopf. für 2 Sekunden. Das Gerät beginnt sich automatisch zu justieren bis der Alkoholsensor stabilisiert ist. In der LCD Anzeige wird eine hinunterzählende Zahlenfolge abgebildet, die die Zyklen und Kreisläufe des Gerätes überprüft. Dieses Verfahren dauert ca. 30 Sekunden bis max. 1 Minute. Das Gerät ist fertig, wenn zwei Pieptöne ertönen, und das "WAIT" Signal auf der Anzeige verschwindet (LCD-Anzeige zeigt: 0.00 g/L = Promille)

2. Die Alkoholmessung

Ihren Mund sicher und nahe zur Einlassöffnung (ungefähr 2 cm) führen, und mit einem tiefen Atemzug für mindestens 4 Sekunden in das Gerät blasen.

BITTE MERKEN: Wir empfehlen vor Gebrauch, die Einnahme von einem Glas Wasser und eine Wartezeit zwischen Test und Genuss des letzten alkoholischen Getränkes von mindestens 20 Minuten. Nur so ist eine genaue Messung möglich!

3. ANZEIGE

Bereich	Display und Tonsignale
0,00% - 0,01%	1 Tonsignal
0,02% - 0,04%	2 Tonsignale
0,05% und darüber	5 Sek. Tonsignale

4. Neue Messung

Wenn das "WAIT" Zeichen auf dem LCD erlischt und die Anzeige 0.00 g/L darstellt, ist das Gerät für den nächsten Einsatz bereit. Nach 5 Minuten schaltet der AlkoStar AL-2500 automatisch aus.

5. Batterie

Der AlkoStar AL-2500 informiert Sie, wenn die Batterien gewechselt werden müssen (ein niedriges Batterie Signal wird auf der LCD-Anzeige dargestellt). Bei einem Batteriewechsel sollten ausschließlich neue Alkali-Batterien vom Typ AA verwendet werden.

ANMERKUNG: Das Symbol „niedrige Batteriesignal“ leuchtet kurz während des Anschaltens auf. Diese Anzeige gehört zum Funktionstest und bedeutet nicht, dass der Batteriestand niedrig ist.

6. Warnungen

Geschlossene Zimmer mit wenig Belüftung bzw. Klimaanlage können die Zeit zwischen den einzelnen Prüfungen verändern. Um genaue Ergebnisse zu erhalten, sollte die Wartezeit mindestens 20 Minuten nach Ihrem letzten alkoholischen Getränk betragen. Trinken Sie ein Glas Wasser oder andere alkoholfreie Getränke, um den Alkoholgehalt in Ihrem Mund zu minimieren, da der Alkoholgehalt in Ihrer Atemluft einen höheren Wert verursachen kann. Wiederholen Sie den Test 2-3 mal um ein zuverlässiges Prüfungsergebnis zu erhalten. Blasen Sie keinen Zigarettenrauch oder Flüssigkeit in den Sensor des Gerätes. Benutzen Sie den AlkoStar AL-2500 nicht zur Sicherstellung Ihrer Fahrtüchtigkeit. Halten Sie den AlkoStar AL-2500 von extremen Temperaturen fern und außerhalb der Reichweite von Kinder. Um die Genauigkeit beizubehalten, sollte das Gerät alle 6-12 Monate neu kalibriert werden (Kalibrierung ist von dem Gebrauch des Gerätes abhängig). Für Details zur Neukalibrierung gehen Sie bitte auf unsere Website: www.alkostar.de

7. Garantie

Herstellergarantie beläuft sich auf 24 Monate wenn das Produkt, Herstellerfehler in Arbeitsausführung oder Materialfehler aufweist (außer Kalibrierung). Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Der Hersteller verpflichtet bei einem Defekt zur Reparatur oder zum Ersatz des Gerätes (Kaufbeleg muss nachgewiesen werden). Diese Garantie kann nur gewährt werden, wenn an dem Gerät nicht manipuliert worden ist, es boshaft beschädigt oder zweckentfremdet worden ist.

8. Widerruf

Der Hersteller, der Importeur oder der Distributor übernimmt keine Verantwortung bei Fehlverwendung des Produktes und die dadurch resultierende Schäden. Dieses Produkt kann nicht verbindlich dazu genutzt werden um festzustellen, ob eine Person nach dem Genuss von Alkohol ein Fahrzeug lenken oder eine Maschine bedienen kann. Der Genuss von jeglichem Alkohol beeinflusst Reflexe und beeinträchtigt das Urteilsvermögen.